

## Entnahme einer Haarprobe



1

- Saubere Hände + sauberes Tier.
- Haare von anderen Tieren unbedingt vermeiden.
- Haare **gegen** die Wuchsrichtung ausrupfen.



2

- 50 – 100 Haarwurzeln werden benötigt.



3

- Haftfolie zurück klappen.
- **Haarwurzeln** auf geöffnete Karte legen.




4

- Folie zurück klappen und Haare mit Folie abdecken.
- Rand der Haftfolie festdrücken.



5

- Überstehende Haare abschneiden.
- Karte mit der Papierlasche schliessen.

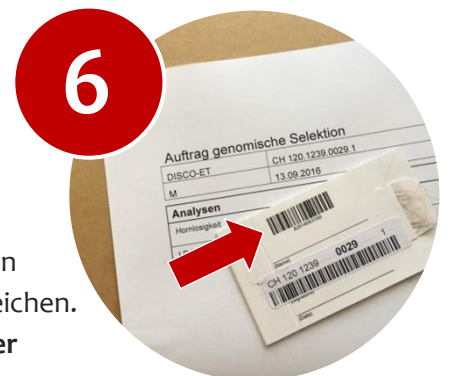

6

- TVD-Kleber auf die Haarkarte kleben und nochmals mit Ohrmarke vergleichen.
- Den **vorgedruckten Barcode auf der Haarkarte** unbedingt **frei lassen**.
- **Auftrag online** erfassen und das Auftragsformular ausdrucken.

**Haarkarte und Auftragsformular** zusammen in einem normalen Briefumschlag an folgende Adresse schicken:

**Qualitas AG, Genomische Selektion, Chamerstrasse 56, 6300 Zug**